

お客様各位

PLATON JAPAN
株式会社プラトンジャパン

ホルダー付きインプラントのインプラントホルダー仕様変更について

平素はプラトンインプラント製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、プラトンシステムのツールには、トルクラチェット・ラウンドラチェット・エクステンション等において、キャリア機能を付与したタイプとキャリア機能を持たない2種類のタイプがラインナップされており、ご使用になられている先生方にはご不便をお掛けしております。

また、ホルダー付インプラントボディ (Type I・II・IV) に予め装着しておりますインプラントホルダーにキャリア機能を持つツールを組み合わせますと、Oリングとキャリア機能構造が干渉し、埋入後のインプラントボディからホルダーが解除できなくなるといったトラブルも稀に発生しておりました。

これらを解消するため、ホルダー付インプラントボディ (Type I・II・IV) に装着のインプラントホルダーの仕様を変更させていただきます。変更の概要、ご使用上の注意事項につきましては下記のとおりです。なお、SAG 品は 2013 年 9 月下旬出荷分より順次変更しており、Bi0 品は 2014 年 1 月より順次変更致します。しばらくは新旧製品が併売されます。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

1. 変更内容

インプラントホルダーに付与しておりますOリングの位置を、インプラントホルダー本体からインナースクリュー頭部へ移動致します。(右図)

2. 変更対象品

インプラントボディ (Type I・II・IV) 全て (SAG・Bi0 共)

3. 変更による効果

キャリア機能付エクステンション等、キャリア機能を有するツールとの干渉が解消されます。

4. 変更後のご使用上の注意

新仕様のインプラントホルダーは、コントラドライバー等、キャリア機能を持たないツールでの口腔内へのキャリア及び口腔内からのピックアップが出来なくなります。コントラ埋入を行う場合は、キャリア機能を有する、BSハンドピースアダプターをご使用下さい。


5. 変更品の識別について

- ・ SAG: 商品コードの末尾に「S」を付与致します。
(例) TypeIV SAG $\phi 3.8 \times 10$ の場合
(旧コード) N38-H100 → (新コード) N38-H100S
- ・ Bi0: 商品コードの末尾に「B」を付与致します。
(例) TypeIV Bi0 $\phi 3.8 \times 10$ の場合
(旧コード) N38-H10H → (新コード) N38-H10HB
あわせて、ブリストアパックに識別のための赤色のシールを付与します。(右写真)

6. 変更時期

SAG 品は 2013 年 9 月下旬出荷分より順次変更しており、Bi0 品は 2014 年 1 月出荷分より順次変更致します。しばらくは新旧製品が併売されます。

ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

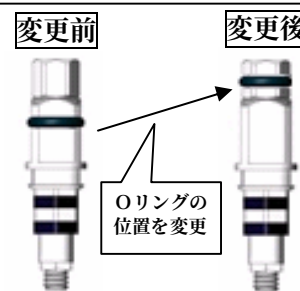

変更前

変更後



SAG



Bi0

キャリア機能付ツール



キャリア機能なしツール

