


販売名: プラトン Oリングハウジング 一般名: 歯科インプラント用上座構造材 クラス分類: 管理医療機器 製造販売業者: (株)プラトン(株) 登録商標特許: 2244GBZ0012000

プラトンインプラント SD

材質:チタン合金
1パック同サイズ2本入り

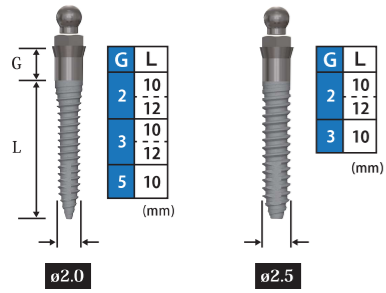

販売名: プラトン インプラント SD
一般名: 歯科インプラントシステム
クラス分類: 高度管理医療機器
製造販売業者: (株)プラトン(株)
登録商標特許: 2244GBZ0012000

Oリングハウジング



(1パック2個入り)
材質:チタン合金

本製品にはOリングは付属しておりませんので
ご注意ください。ご使用の際は、別途Oリングを
ご購入の上ご使用ください。
Oリングについてはお問い合わせください。


シリコーンチューブ



(1パック10個入り)


ラチェットドライバー SD

材質:ステンレス

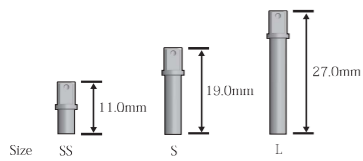

販売名: ラチェットドライバー SD 一般名: 歯科インプラント手術器具 クラス分類: 一般医療機器
製造販売業者: (株)プラトン(株) 登録商標特許: 2015IK-0007000,50

トルクラチェット / ラウンドラチェット

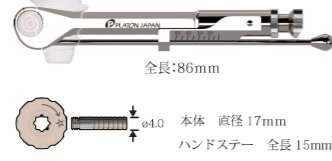

販売名: トルクラチェット 一般名: 歯科インプラント補助器具 クラス分類: 一般医療機器
製造販売業者: (株)プラトン(株) 登録商標特許: 1381X1008-00002

歯肉ゲージ



販売名: 歯肉ゲージ 一般名: 歯科用インプラント手術器具 クラス分類: 一般医療機器
製造販売業者: (株)プラトン(株) 登録商標特許: 1382X0004C00056

パラレルドリルガイド



※パラレルドリルガイド本体のみではご利用いただけません。
ガイドピン・ドリルスリーブのセットもご購入ください。

インプラント SD 練習用ボディ

材質:チタン合金




模型への挿入深度を目視にて容易に確認を
可能にするレーザーマークを付与。

ドリル

ガイドドリル




ガイドピン

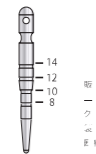


スターティングドリル ø1.6 / ø1.8



インプラントドリル ø2.1

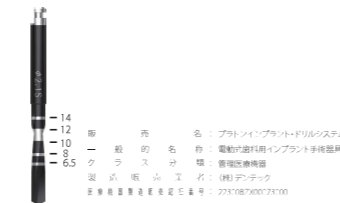

インプラント SD コンサルテーション模型

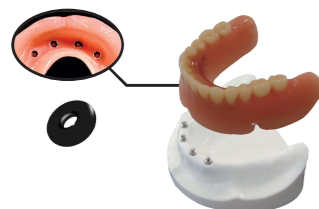


患者様により具体的な術式説明が出来、
義歯の高い維持安定性を提示すること
が容易です。

シンプルインプラント SD 模型

販売サイズの見直しに伴う変更を予告なしに行う
場合がありますのでご了承ください。

Satisfactory Denture

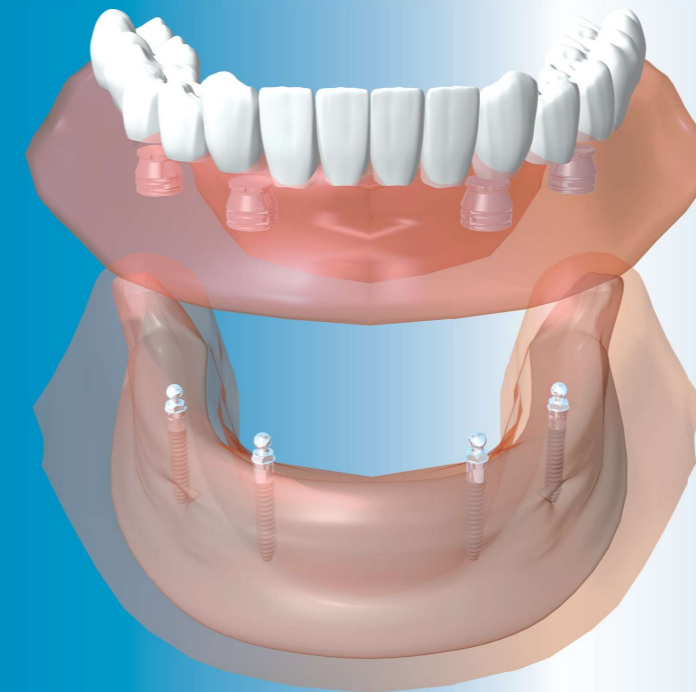


インプラント SD は直径 ø2.0 と ø2.5 の
2サイズのインプラント体と、ボールアタッチメント
が一体化した下顎総義歯用インプラントです。

表面処理

Sand-blasting


Acid Etching

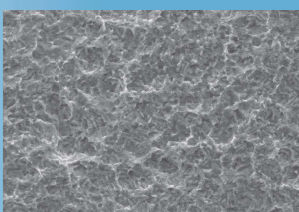


インプラント SD ø2.0
チタン合金

インプラント SD ø2.5
チタン合金

Oリングハウジング
チタン合金

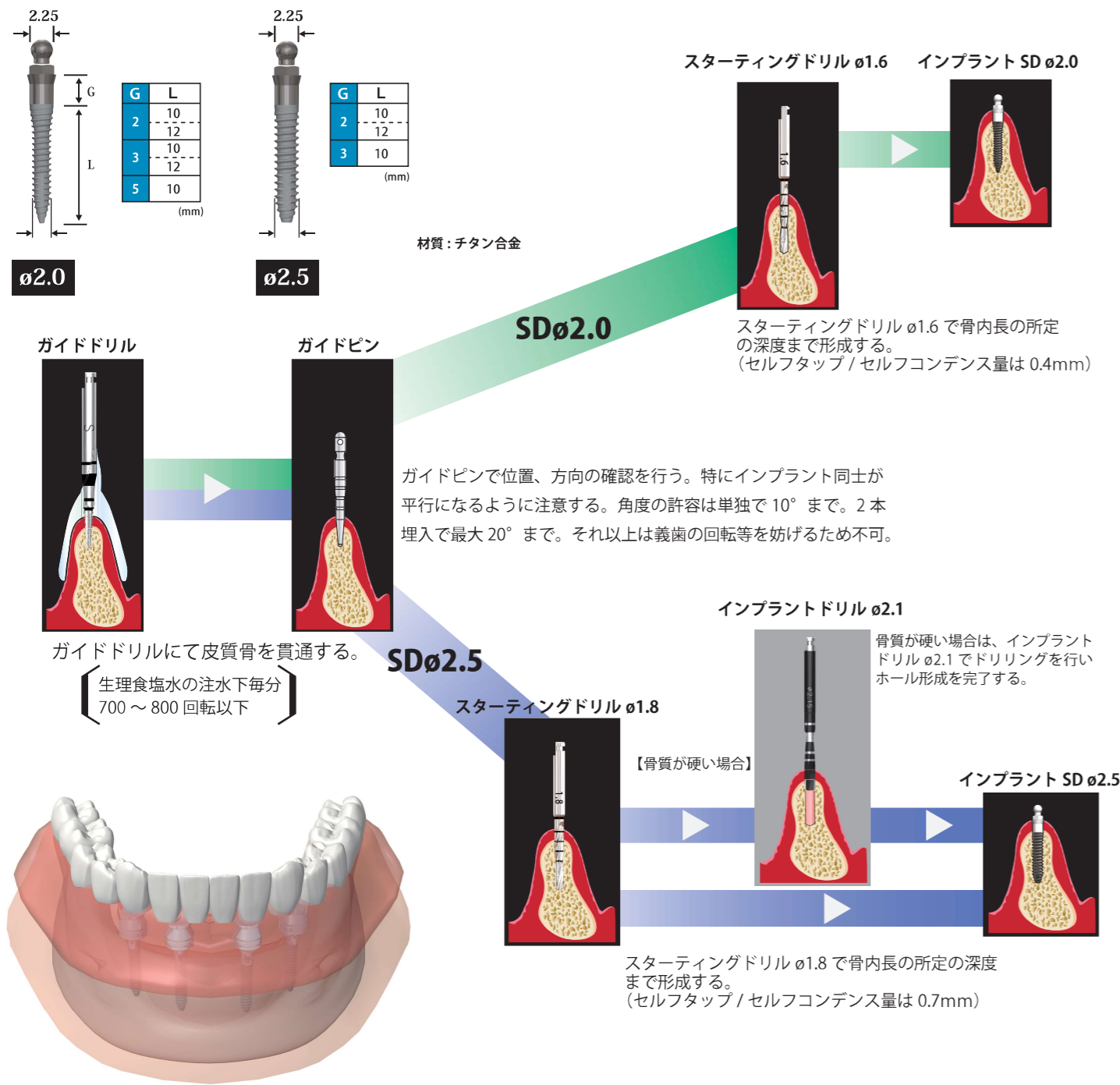


インプラント SD の植立

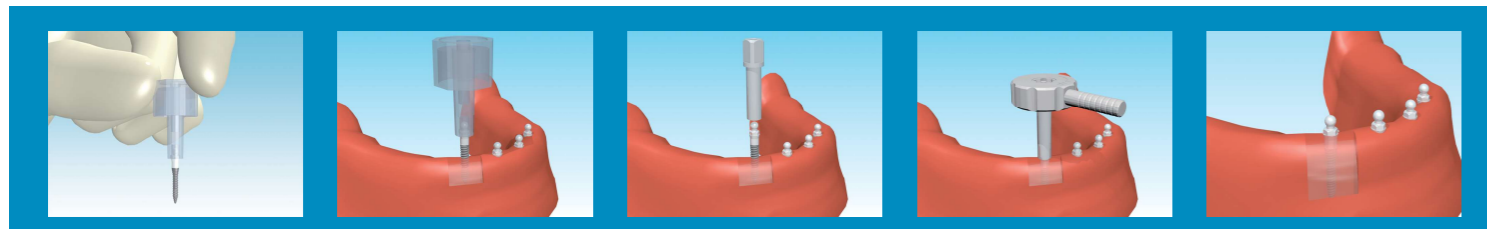

- ① アンブルケースのキャップを外しそのまま口腔内へ移動する。インプラントSDが自立するまで正回転（時計回り）で埋入する。
- ② 骨内に自立したことを確認した後、キャップを除去する。
- ③ ラチェットドライバー SD を装着し、トルクラチェットもしくはラウンドラチェットでプラスト部が完全に骨内に収まるように植立する。その際、ラチェットには必ずフィンガーレストを置き、長軸方向に軽く圧をかけてブレを防止する。

インプラントSDと歯槽骨の関係

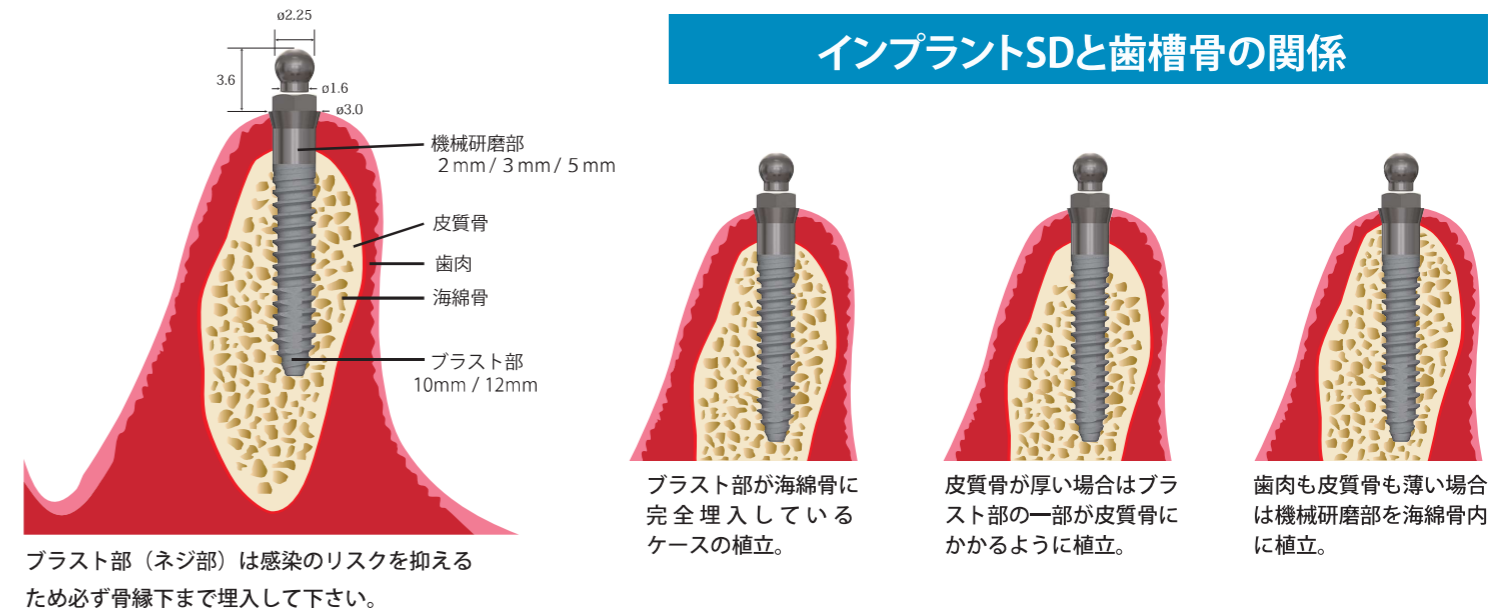

インプラントSDの植立における注意点

- ※ 植立方向には十分ご注意ください。複数本の植立において平行性がとれていないと義歯の着脱が不可能になる場合があります。
- ※ 舌側への一部露出、貫通による血管の損傷や感染にご注意下さい。
- ※ 初期固定は20Ncmを基準として30NcmをMAXとします。20Ncm以下の場合、即時荷重を避けて、4週間以上の免荷期間を置いて下さい。
- ※ フラップレス手術は、触診・CT撮影で骨の形態を把握し、それに基づくサージカルガイドを活用し十分な診査診断のもと行って下さい。
- ※ 歯槽骨頂が鋭利であったり、極端に骨幅が狭い場合は、最低でもミニマムフラップを行い歯槽骨を目視して、必要に応じて歯槽骨形成を行ってから植立して下さい。

Oリングハウジングの装着について

